

PID: 396

UID: 396

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2022 17:51



RYSTOCETYNA 125 MG/ML



OPIS OGÓLNY

Stężenie: 125 mg/mL

Dostarczony jako: Stabilizowany liofilizat rystocetyny

Przygotowanie: Rozpuścić w 0,5 mL sterylnej wody destylowanej. Mieszać delikatnie, nie wstrząsać!

Przechowywanie i trwałość: Liofilizat - temp. 2-8 °C; Rozpuszczony reagent - 3 miesiące w temp. <- 20°C, rozporcjowany;
Stężenie robocze - 24h w temp. 2-8°C

Zalecane objętości: Krew (rozcieńczona/nierozcieńczona): Dodać 8 uL reagentu do 1 mL próbki aby uzyskać stężenie końcowe 1 mg/mL; PRP: Dodać 5 uL reagentu do 500 uL próbki aby uzyskać stężenie końcowe 1,25 mg/mL

MODELE

▪ 396

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl