

PID: 386

UID: 386

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2022 17:13



TROMBINA 10 U/ML



OPIS OGÓLNY

Każda fiolka zawiera 10 jednostek liofilizowanej trombiny z ludzkiego osocza (10-20 oznaczeń).

Stężenie: 10 U/mL

Dostarczona jako: Liofilizowana trombina z ludzkiego osocza

Przygotowanie: Zawartość fiolki rozpuścić w 1 mL soli fizjologicznej. Pozostawić na 10 minut do rozpuszczenia mieszając fiolką od czasu do czasu

Przechowywanie i trwałość: Liofilizowany reagent: poniżej 0°C; Rozpuszczony reagent: 3 miesiące w temp. - 70°C, rozporcjowany; Stężenie robocze: 24h w temp. 2-8°C

Zalecane objętości: Krew (rozcieńczona/nierozcieńczona): Dodać 100 uL odczynnika do 1 mL próbki, aby otrzymać stężenie końcowe 1 U/mL; PRP: Dodać 50 uL odczynnika do 500 uL próbki, aby otrzymać stężenie końcowe 1 U/mL; Tylko sekrecja: Max. uwalnianego ATP w stężeniu końcowym 1 U/mL

MODELE

▪ 386

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl